




MANUALE PER L'USO

Invitiamo a contattare il sito Geemarc.com per ottenere il Manuale Dettagliato per l'Uso

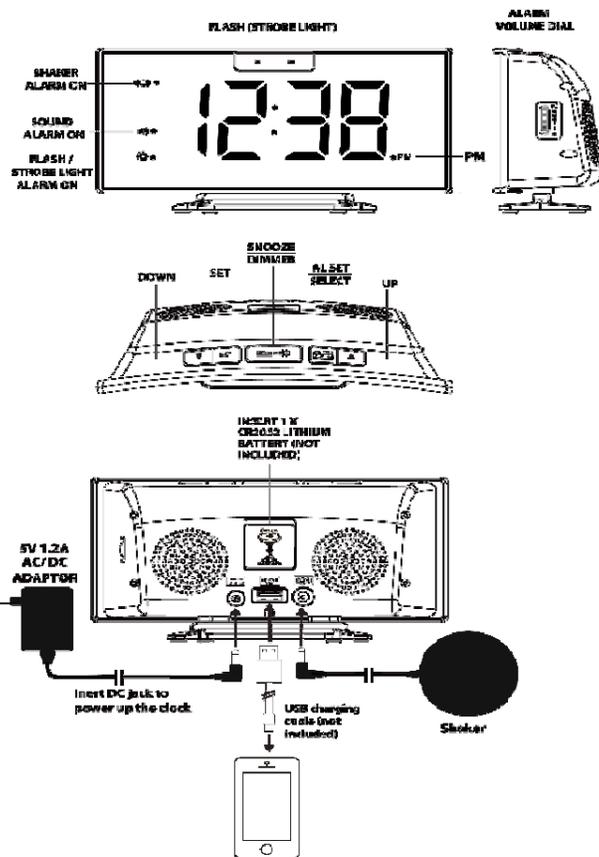

English	Italiano
Flash (strobe light)	Flash (luce stroboscopica)
Alarm	Sveglia:
Volume dial	Reg. Volume
Shaker	Vibratore
Alarm On	con sveglia
Sound	Suono
Alarm On	con sveglia
Flash / Strobe light	Flash / Luce strobo
Alarm On	con sveglia
Down	Giù
Set	Imposta
Snooze	Pisolino
Dimmer	Reg. luminosità
Up	Su
Insert 1x CR2032 Lithium battery (not included)	Inserire 1x batteria al litio CR2032 (non fornita)
5V 1.2A AC/DC Adaptor	Adattatore 5V 1,2A CA/CC

Insert DC jack to power up the clock	Inserire la spina DC per alimentare l'orologio
USB charging cable (not included)	Cavo di ricarica USB (non fornito)
Shaker	Vibratore

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DI BACKUP

L'orologio richiede una batteria al Litio CR2032 (non fornita) per fornire la potenza di backup all'orologio, nel caso di interruzione temporanea di alimentazione elettrica. Appoggiare l'unità a faccia in giù su una superficie piana.

1. Far scivolare e aprire il coperchio della batteria sul fondo dell'unità.
2. Inserire una nuova batteria al Litio CR2032 nell'alloggiamento batteria, con la faccia + rivolta verso l'alto, come indicato.
3. Rimontare il coperchio della batteria.

Non è necessario inserire una batteria di backup per far funzionare l'orologio; tuttavia, inserendo la batteria di backup si mantiene la regolazione dell'ora e della sveglia nel caso di interruzione dell'alimentazione elettrica o sconnessione dell'adattatore CC.

Se l'alimentazione elettrica di rete è interrotta o l'adattatore è scollegato, il quadrante LED dell'orologio si spegne e la sveglia non funziona.

Si invita a sostituire la batteria ogni anno per evitare danni al dispositivo.

INSTALLAZIONE

Collegare l'adattatore CA/CC a una presa domestica CA e poi inserire la spina CC nella presa dell'unità. L'orologio è ora pronto.

REGOLAZIONE DELL'ORA E DELLA DURATA DEL PISOLINO

1. Premere una volta **SET**, la cifra "0" dell'ora lampeggia. Premere ▲ o ▼ per impostare le ore (mantenere premuto per avanzamento rapido).
2. Premere una volta **SET**, le cifre "00" dei minuti lampeggiano. Premere ▲ o ▼ per impostare l'ora in minuti. (Mantenere premuto per avanzamento rapido).
3. Premere di nuovo **SET**, il quadrante mostra "24Hr" e lampeggia. Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato dell'ora "12Hr" o "24Hr". Il LED **PM** appare in basso a destra per indicare l'ora pomeridiana; non vi è indicatore **AM**.
4. Premere di nuovo **SET**, il quadrante mostra "05" e lampeggia. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tempo di pisolino tra 5 e 60 minuti.
5. Premere di nuovo **SET** o se non viene premuto alcun tasto per circa 10 secondi uscita dalla modalità di impostazione.

PER IMPOSTARE LA SVEGLIA

1. Premere e tenere premuto **AL SET / SELECT**, il LED e le cifre delle ore lampeggiano. Premere ▲ o ▼ per impostare la sveglia in ore. (Mantenere premuto per avanzamento rapido).
2. Premere **AL SET / SELECT** di nuovo, le cifre dei minuti lampeggiano. Premere ▲ o ▼ per impostare la sveglia in minuti. (Mantenere premuto per avanzamento rapido).
3. Premere di nuovo **AL SET / SELECT**, LED appare "HI" (vibrazione a livello HI), premere ▲ o ▼ per selezionare "LO" (vibrazione a livello Lo).
4. Premere **AL SET / SELECT** di nuovo, il LED appare "F-1 (ex. 800 Hz)" e lampeggia, premere ▲ o ▼ per selezionare il tono della sveglia (frequenza):
F-1 (tono basso, 800 Hz), F-2 (tono medio, 1 KHz), F-3 (tono alto, 1,5 KHz)
5. Premere di nuovo **AL SET / SELECT** o se non viene premuto alcun tasto per circa 10 secondi uscita dalla modalità di impostazione della sveglia.

PER ACCENDERE/SPEGNERE E SELEZIONARE LA MODALITÀ SVEGLIA

1. In modalità normale di esposizione dell'ora, premere uno alla volta **AL SET / SELECT** per attivare la sveglia ed accendere i corrispondenti indicatori di sveglia sulla parte sinistra del quadrante dell'ora:

: attivata solo la sveglia vibrata

- : attivati suono e sveglia vibrata
- : attivati luce strobo e sveglia vibrata
- : attivati luce strobo, suono e sveglia vibrata

2. Premere ancora una volta **AL SET / SELECT** per disattivare tutte le sveglie, tutti e indicatori di sveglia sono disattivati.

Nota: Per usare la sveglia vibrata, collegare la spina del vibratore a tergo dell'orologio. Nota: se l'utente non vuole usare la funzione sveglia vibrata, staccare la spina della sveglia vibrata dall'orologio.

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLA SVEGLIA (CICALINO)

Si può agire sulla ghiera volume sulla parte destra dell'orologio per regolare il volume di sveglia.

Questa sveglia può essere impostata su livelli molto alti di volume - si invita ad usare con cautela. Aumentare il volume gradualmente fino a raggiungere un livello confortevole.

PER ARRESTARE E REIMPOSTARE LA SVEGLIA PERCHÉ FUNZIONI IL PROSSIMO GIORNO

Quando la sveglia suona, il corrispondente indicatore di sveglia lampeggia. Premere una volta **AL SET / SELECT** per arrestare la sveglia e reimpostarla perché funzioni il prossimo giorno. Fatto ciò, l'indicatore corrispondente di sveglia resta sullo schermo.

PER IL PISOLINO (la durata predefinita del pisolino è di 5 minuti)

Quando suona la sveglia, premere una volta **Zz • ☀**, la sveglia si interrompe temporaneamente ed il corrispondente indicatore di sveglia continua a lampeggiare. La sveglia riprende a suonare appena trascorso il tempo di pisolino predefinito.

PER USARE IL REGOLATORE DI LUMINOSITÀ HI-MED-LO (CIFRE LED DELLE ORE)

Il livello luminoso del display LED può essere regolato su 3 intensità. Premere **Zz • ☀** per regolare la luminosità (**HI / MED / LO**) del quadrante LED. Ciò può essere fatto solo quando la sveglia non sta suonando. All'inizio la luminosità è impostata su Hi.

RICARICARE IL TELEFONINO DALLA PRESA USB

Collegare il cavetto di ricarica del cellulare alla presa USB a tergo dell'orologio e collegare l'altra estremità alla presa di ricarica micro USB del cellulare. L'orologio ricaricherà automaticamente il cellulare.

Nota:

1. Assicurare che il cavo fornito con il cellulare sia usato per la ricarica.
2. Assicurare che venga usato l'adattatore fornito con questo orologio (9V 1,5A) per la sua alimentazione elettrica.
3. Non è possibile ricaricare un iPad® o notepad dalla presa USB di questo orologio.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Se l'orologio non segna l'ora corretta o non funziona correttamente, ciò può essere causato da scariche elettrostatiche o altre interferenze. Quando il temporizzatore elettrico di un termosifone si accende o si spegne, la richiesta di corrente è elevata (filtraggio scadente di rete). L'adattatore di rete dell'orologio deve essere collegato solo a una presa di rete a muro. L'adattatore di rete dell'orologio deve essere collegato solo a una presa di rete a muro - non a una prolunga condivisa con termosifoni elettrici (o con altra strumentazione ad alto consumo).

CURA DEL PRODOTTO

1. Posare l'orologio su una superficie stabile, distante da fonti di calore, umidità e esposizione diretta al sole.
2. Proteggere il mobilio di legno naturale o laccato con un panno o altro materiale protettivo tra la sveglia ed il mobile.
3. Pulire l'unità con un panno morbido inumidito solo con acqua e sapone. Agenti più forti, quali benzene, solventi o materiali simili possono danneggiare la superficie dell'unità. Assicurarsi che l'unità sia scollegata prima di pulirla.
4. Estrarre la batteria di backup dall'orologio, se questo non sarà usato per un mese o più, per evitare possibile corrosione. Se

l'alloggiamento batterie diventa corroso o sporco, pulirlo accuratamente e sostituire la batteria.

SPECIFICA TECNICA

Durata della sveglia:	1 ora	
Durata del pisolino (regolabile):	da 5 a 60 minuti	
Impostazioni di default:	Formato ora:	24 ora
	Ora:	00:00
	Sveglia:	06:00
	Livello sveglia e vibrazione:	HI
	Frequenza del segnale acustico:	F-1
	Durata del pisolino:	05 (5 minuti)
Segnale udibile:	95 dB alla distanza di 1 metro	

GARANZIA

Dal momento in cui il prodotto Geemarc è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante tale periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Se si verifica un guasto, contattare il nostro servizio d'assistenza help line o visitare il nostro sito web www.geemarc.com.

La garanzia non copre incidenti, negligenza o la rottura di una parte. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da persona che non sia un rappresentante autorizzato Geemarc.

La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i diritti legali.

IMPORTANTE: LA RICEVUTA FA PARTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA NEL CASO DI UN RECLAMO IN GARANZIA

La invitiamo a prendere nota che: La garanzia è applicabile solo in ambito GB.

DICHIARAZIONI:

Direttive CE

Geemarc Telecom SA dichiara con la presente che questo prodotto è compatibile con i requisiti essenziali ed altre disposizioni di rilievo della direttiva per la Strumentazione di Terminali Radio e Telecomunicazioni. La dichiarazione di conformità CE può essere consultata sul sito www.geemarc.com

Collegamento elettrico: L'apparato è studiato per il funzionamento con una corrente a 230V 50Hz. (Classificato come "voltage pericoloso" in base alla norma EN 60950). L'apparato non ha un interruttore di accensione / spegnimento. Per spegnere il dispositivo, scollegare l'adattatore.

Quando si installa l'apparato assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

Direttive sul Riciclaggio

Il WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Smaltimento di Strumentazione Elettrica ed Elettronica) viene applicato ai prodotti, in modo che alla fine della loro durata utile vengano riciclati nel migliore dei modi.

Quando questo prodotto ha terminato il suo servizio, si prega di non gettarlo nel cestino dei rifiuti domestici. Si invita a scegliere una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'adatto cassetto come da direttiva. Depositare il prodotto nell'apposito cassetto, o
- Portare il vecchio prodotto al rivenditore. Se ne acquistate uno nuovo, dovrebbe accettarlo.

Rispettando così le istruzioni, assicurate la sanità umana e la protezione dell'ambiente.